

«СУВПЛАСТ»
пластир трансдермальний
з діючими речовинами рослинного походження

Для відновлення функції та усунення дискомфорту у м'язах, сухожиллях, суглобах.
Медицинний виріб. Зовнішнє застосування у дорослих та дітей від 12 років

Склад пластиру: сополімер акрилату – 72,95%, гліцерин – 23,26%, екстракт коріння мартинії запашної (*Harpagophytum procumbens*) – 2%, екстракт арніки гірської (*Arnica montana*) – 0,93%, екстракт босвелії пільчатої (*Boswellia serrata*) – 0,31%, камфора – 0,31%, екстракт кори верби білої (*Salix alba*) – 0,16%, полісорбат 60 – 0,075%.

Призначення:

Для усунення відчуття дискомфорту в спині, попереку, шиї та суглобах, викликаного:

- порушенням функції сухожиль, зв'язок, м'язів та суглобів травматичного та нетравматичного походження,
- м'язовою крепатурою,
- розвитком остеоартрозу.

Спеціальна технологія забезпечує тривалу дію пластиру «СУВПЛАСТ» – до 24 годин.

Спосіб застосування:

Тільки для зовнішнього одноразового застосування!

1. Відкрийте упаковку та дістаньте пластир.
 2. Видаліть захисну плівку.
 3. Приклейте пластир на потрібну ділянку тіла.
 4. Залиште на 24 години, потім за потреби замініть на новий.
- За необхідності відріжте ножицями менший розмір.

Застереження:

- Перед застосуванням прочитайте інформацію на упаковці.
- Тримайте в недоступному для дітей місці.
- Застосовуйте на ділянках неушкодженої, чистої та сухої шкіри.
- Пластир не можна накладати на відкриті рани (наприклад, на подряпини, порізи) або на екзематозні ділянки шкіри.
- Запобігайте контакту з очима та слизовими оболонками.
- Припиніть застосування у разі явного подразнення шкіри або підвищеної чутливості до складових.
- Не використовуйте у випадку, якщо упаковка розірвана або пошкоджена.
- Не використовуйте на одній ділянці понад 4 дні поспіль без перерви, щоб уникнути висипань на шкірі.

Форма випуску:

по 1 пластиру розміром 9 x 14 cm (см) в пакеті, по 5 або 10 пакетів у картонній коробці.

Номер виробничої партії (лот): вказаний на пачці та пакеті.

Дата виробництва: вказана на пачці та пакеті.

Строк, до якого гарантовано безпечне застосування медичного виробу: вказана на пачці та пакеті як «Використати до».

Строк придатності: 5 років.

Умови зберігання:

зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C в сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці.

Виробник: Еуросісел Спа, Віале Еуропа, 30, 20047 Кусаго (Мілан), Італія.

Уповноважений представник в Україні / Імпортер: ТОВ «ОМНІФАРМА»,
Україна, 02141, м. Київ, вул. Олександра Мишуги, буд. 10, прим. 212; тел.: + 38 044 377-51-14;

Дізнайтесь більше на: www.omnifarma.com.ua

Виробник несе повну юридичну та адміністративну відповідальність за відповідність продукції даним, наведеним в Інформації із застосування медичного виробу.